



Gestión de la Cultura y el Bienestar  
Unidad de Salud - Asistencial  
Desinfección de Elementos para la Valoración del Crecimiento y  
Desarrollo

Código: PA-GU-10-PT-32

Versión: 0

Fecha de Actualización: 11-04-2016

Página 1 de 3

<b>1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:</b>	Gestión de la cultura y el bienestar- Gestión Asistencial Unidad de Salud
<b>2. RESPONSABLE(S):</b>	Profesional de enfermería
<b>3. OBJETIVO:</b>	Garantizar la seguridad en la atención en el programa de control de crecimiento y desarrollo a nuestros afiliados de la Unidad de Salud a través una adecuada limpieza y desinfección de los equipos de valoración.
<b>4. ALCANCE:</b>	Aplica a las acciones complementarias del Programa de crecimiento y desarrollo.
<b>5. MARCO NORMATIVO:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Resolución 412 de 2000: norma técnica para la detección temprana de alteraciones del niño menor de 10 años.</li><li>• Manual de procedimientos para el control del crecimiento y desarrollo de la niña y el niño</li><li>• Ley 1438 de 2011: se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud</li><li>• Resolución 2003 de 2014: define la habilitación de los servicios en salud.</li><li>• Resolución 2003 de 2014: Normatividad de habilitación.</li></ul>

**6. CONTENIDO:**

<b>LIMPIEZA MENSUAL DE ELEMENTOS DE VALORACION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO</b>			
No.	Actividad / Descripción	Cargo Responsable	Punto de control
1.	Solicitud de insumos de limpieza	Enfermero (a)	
2.	Lavado de manos de acuerdo al protocolo institucional	Enfermero (a)	
3.	Retirar los elementos de la vitrina y colocarlos temporalmente dentro de una caja conservando su seguridad.	Enfermero (a)	
4.	Extraer lo que se pueda dañar de algunos elementos	Enfermero (a)	
5.	Limpiar el interior de la vitrina con paño humedecido con solución jabonosa.	Enfermero (a)	



Gestión de la Cultura y el Bienestar  
Unidad de Salud - Asistencial  
Desinfección de Elementos para la Valoración del Crecimiento y  
Desarrollo

Código: PA-GU-10-PT-32

Versión: 0

Fecha de Actualización: 11-04-2016

Página 2 de 3

6.	Quitar el jabón de la vitrina con paño húmedo y secarlos con toallas de papel desechable en el interior de la vitrina	Enfermero (a)	
7.	Lavar con agua jabonosa los diferentes elementos de valoración de crecimiento y desarrollo	Enfermero (a)	
8.	Retirar el jabón con agua corriente.	Enfermero (a)	
9.	Secar los elementos de crecimiento y desarrollo con toallas de papel desechables.	Enfermero (a)	
10.	Dejar secar los elementos de crecimiento y desarrollo, finalmente a temperatura ambiente.	Enfermero (a)	
11.	Ubicar nuevamente los elementos en su respectivo orden evaluación, según manual de procedimientos de crecimiento y desarrollo.	Enfermero (a)	
12.	Registrar el procedimiento en el formato PA-GU-10-FOR-39, registro de desinfección de equipos de crecimiento y desarrollo.	Enfermero (a)	

<b>7. FORMATOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>PA-GU-10-FOR-39 Registro de desinfección de equipos de crecimiento y desarrollo.</li></ul>
<b>8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:</b>	

**9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:**

Fecha	Versión: No.	Código	Modificaciones
11-04-2016	0	PA-GU-10-PT-32	Creación de protocolo

<b>10. ANEXOS:</b>	
--------------------	--



Gestión de la Cultura y el Bienestar  
Unidad de Salud - Asistencial  
Desinfección de Elementos para la Valoración del Crecimiento y  
Desarrollo

Código: PA-GU-10-PT-32

Versión: 0

Fecha de Actualización: 11-04-2016

Página 3 de 3

ELABORACIÓN	REVISIÓN
Nombre: Yenny Patricia Galindo Valencia	Nombre: María del Socorro Cisneros Enríquez
Cargo: Enfermera	Responsable Subproceso
Fecha: DD-MM.AA	Cargo: Directora
	Fecha: DD-MM.AA
REVISIÓN	APROBACIÓN
Nombre: María del Socorro Cisneros Enríquez	
Responsable Proceso	
Cargo: Directora	Rector Juan Diego Castrillón Orrego
Fecha: DD-MM.AA	Fecha: 11-04-2016

COPIA NO CONTROLADA